

## GoTalk Express 32

Wie bei den bekannten GoTalk Geräten bietet der GoTalk Express 32 fünf Ebenen, um Mitteilungen in sehr guter Sprachqualität aufzunehmen. Die Symbolfelder reagieren bereits auf leichten Druck und sind durch ein Fingerführeraster voneinander getrennt.

Die fünf Ebenen erleichtern die Organisation des Wortschatzes z. B. nach Themen oder verschiedenen Benutzern. Ein schneller Wechsel zu einem anderen Thema oder Benutzer ist ohne Löschen der aktuellen Mitteilungen möglich, indem die Ebene umgeschaltet und eine andere Schablone eingelegt wird.

### Der GoTalk Express 32 verfügt über 2 Betriebsarten:

- Der **Standard-Modus** funktioniert wie alle herkömmlichen GoTalks, das Gerät spricht direkt beim Drücken eines Feldes.
- Im neuen **Express-Modus** können zudem mehrere Mitteilungen kombiniert und dann in der gedrückten Reihenfolge über eine „Sprech-Taste“ zusammen abgespielt werden. So wird zum Beispiel das Bilden von ersten eigenen Sätzen möglich.  
z.B.: „Ich möchte“ „Apfelsaft“ „trinken“

Über einen Schieberegler kann zwischen Standard- und Express-Funktion gewählt werden.

Der GoTalk Express 32 kann auch über Scanning bedient werden, dabei stehen 1- und 2-Taster-Scanning zur Verfügung. Die gescannten Felder werden dabei durch einen aufleuchtenden LED-Rahmen visuell hervorgehoben.

Neben visuellem Scanning ist sogar auditives Scanning möglich, zu jeder Mitteilung kann hierzu ein Hinweis über 1,5 Sekunden aufgenommen werden.

Zur individuellen Anpassung stehen verschiedene Einstellungsmöglichkeiten bezüglich Scanningreihenfolge und -geschwindigkeit zur Verfügung.



## GoTalk Express 32

### **Leistungsmerkmale:**

- Sehr robustes Gerät
- Geringes Gewicht
- Direkte Bedienung mit der Hand
- 1- und 2 Taster-Scanning
- Auditives Scanning
- 3 verschiedene Scanmuster:  
schrittweise, linear oder Gruppenscanning
- 5 Ebenen mit je 32 Feldern
- Bis zu 160 Sprachmitteilungen speicherbar
- Kombinieren von Mitteilungen in der Express-Funktion

### **Technische Details:**

- Größe: 32 x 25,5 x 4,5 cm
- 3 AA Batterien
- Kopfhöreranschluss

**Hilfsmittelnummer:** 16.99.03.0900