

MyCORE®

learn to talk - talk to learn

NEU!
MyCORE® mini
Kleinerer Wortschatz
- weniger Felder





MEHR ALS EINE KOMMUNIKATIONSHILFE

Die Nutzung einer Kommunikationshilfe sollte es Kindern und Jugendlichen in erster Linie ermöglichen, aktiv an vielfältigen Interaktionssituationen teilhaben zu können – beim Essen, beim Anziehen, beim Spielen mit anderen Kindern, beim Bücheranschauen, im Unterricht. Um dieses Ziel erreichen zu können, sind die betreffenden Personen zum einen auf ein Kommunikationssystem angewiesen, das in ganz unterschiedlichen Situationen eingesetzt werden kann; zum anderen ist es erforderlich, die Personen beim Erlernen der erforderlichen Fähigkeiten zu unterstützen.



MyCORE ist nicht nur eine Kommunikationshilfe, sondern ein Teil eines umfassenden Kommunikationskonzeptes: Den Kern bildet das Kölner Vokabular – eine auf wissenschaftlichen Wortschatzanalysen basierende Kombination von Kern- und Randvokabular, das in unterschiedlicher Komplexität sowohl auf den Kölner Kommunikationsmaterialien als auch auf MyCORE angeboten wird.

Eine Besonderheit bei dieser Kommunikationshilfe ist der auf das Mitwachsen angelegte Wortschatz:

In der Vollversion umfasst die Grundausstattung des Vokabulars über 2.000 Wörter, in der reduzierten Version ca. 800, in MyCORE mini ca. 300 und im Kommunikationsordner ca. 450.

Durch die gleichbleibenden Positionen sowie die vergleichbare Struktur der nichtelektronischen und elektronischen Hilfe wird zum einen die multimodale Kommunikation unterstützt, zum anderen wird die Erweiterung des Wortschatzes erleichtert.

MyCORE Vollversion

In der Vollversion steht dem Nutzer der komplette Wortschatz mit über 2.000 Wörtern und allen grammatikalischen Funktionen zur Verfügung. Das Vokabular kann natürlich individuell angepasst und erweitert werden.

MyCORE reduzierte Version

reduzierter Wortschatz

Die reduzierte Version entspricht der Vollversion, bietet dem Nutzer aber zunächst einen reduzierten Wortschatz an. Die Positionen der Wörter sind in der reduzierten MyCORE Version und in der Vollversion identisch.

Die Erweiterung des Vokabulars der reduzierten Version erfolgt, indem die Bezugspersonen nach und nach mehr Wörter und Kategorien freischalten – so kann das Vokabular ganz natürlich mit den Fähigkeiten der unterstützten kommunizierenden Person mitwachsen.

MyCORE mini

kleinerer Wortschatz – weniger Felder

MyCore mini bietet einen verhältnismäßig kleinen Wortschatz mit ca. 300 Wörtern. Bereits vorbereitet sind 200 weitere Wörter, die nach und nach eingeblendet werden können. So kann der Wortschatz auf der Kommunikationshilfe mit den Fähigkeiten des Kindes/Jugendlichen mitwachsen.

Mit dem kleineren Wortschatz wurde auch die Anzahl der Felder deutlich reduziert. Die einzelnen Felder sind folglich größer als bei MyCORE.

MyCORE mini richtet sich daher an Nutzer, die motorisch nicht in der Lage sind, die kleineren Felder von MyCORE anzusteuern oder aufgrund anderer Einschränkungen eine geringere Anzahl an Feldern benötigen.

Alle drei Versionen sind auf der MyCORE Kommunikationshilfe vorinstalliert, so dass ein späterer Wechsel auf die Vollversion problemlos möglich ist.

Alle MyCORE-Vokabulare sind nur mit Metacom-Symbolen erhältlich.

MyCORE ist nicht nur eine Kommunikationshilfe, sondern ein Teil eines umfassenden Kommunikationskonzeptes. Neben der elektronischen Kommunikationshilfe stehen auch der Kölner Kommunikationsordner (@Boenisch/Sachse) sowie Informationen und Materialien zur Unterstützung der Sprachentwicklung zur Verfügung.



MyCORE zeichnet sich durch die Kombination von Kern- und Randvokabular aus. In einem statischen Rahmen wird kontextunabhängiges Kernvokabular (z.B. ich, zu, haben, kein) so angeboten, dass es mit themenspezifischem Randvokabular (z.B. trinken, Durst, heiß, Milch) kombiniert werden kann. Formulierungen wie „Ich habe Durst.“, „Kann ich heiße Milch haben?“, „Meine Milch ist zu heiß.“ sind ohne Seitenwechsel möglich. Verschiedene Grammatikfunktionen ermöglichen die Bildung korrekter Formen und Sätze; darüber hinaus können Endungen ausgetauscht (heiß-e, heiß-er, heiß-en), Wörter zusammengesetzt (Milchkaffee) oder mit Vorsilben (be-trinken, er-trinken) gebildet werden.

Ein weiterer Baustein des Kommunikationskonzeptes sind Informationen und Materialien zur Unterstützung der Sprachentwicklung (Wortschatz, Grammatik, Mehrwortäußerungen etc.) unter besonderer Berücksichtigung von Literacy-Angeboten (z.B. Bücher anschauen, Laute hören).

Darüber hinaus verfügt MyCORE auch über Multimedia-Funktionen wie digitale Bücher und die Einbindung von Fotos und Videos. Optional erhältlich sind WLAN, Bluetooth, GSM-Modul (für SMS und Telefonie) sowie eine eingebaute Kamera und Umfeldkontrolle (GEWA).

MyCORE®

learn to talk – talk to learn

BEDIENUNG

- Touchscreen
- 1- und 2-Taster Scanning (auch auditiv)
- Augensteuerung (optional)
- Maus oder Musersatzgeräte (wie Joystick, Trackball, Kopfmaus)

TECHNISCHE DATEN

- 12" LED Resistive Touchscreen
- 120 GB SSD Festplatte
- Gewicht: 1,85 kg
- Größe: 285 x 234 x 39 mm
- Akkulaufzeit: bis zu 10 Std.



Ihr Fachhändler

www.my-core.de

Eine Kooperation von

