

Erste Schritte



Lieferumfang:

Das Timocco-Paket enthält folgendes:

- 3 Ball-Handschuhe (rot, grün, blau)
- 1 USB-Kamera
- Lizenz-Code (jeder Code ist nur für einen PC gültig)
- Erste Schritte



1. Kamera mit dem PC verbinden

Verbinden Sie die Kamera mit dem USB-Anschluss an Ihrem PC und positionieren Sie sie auf Ihrem Monitor.

Stellen Sie sicher, dass der PC in einem hellen Raum mit ausreichend Bewegungsfreiheit steht.



2. Software herunterladen und installieren

Laden Sie die Software von der Timocco-Webseite herunter.
(die Web-Adresse finden Sie oben auf der Timocco-Box)

Starten Sie die Installation und folgen Sie den Anweisungen des Installations-Assistenten.




3. Aktivierung der Software

Wenn die Installation beendet ist, öffnet sich ein Aktivierungsfenster.

Hier müssen Ihr Name, Emailadresse und Lizenz-Code eingegeben werden. Der Lizenz-Code muss mit Bindestrichen eingegeben werden!

Um die Online-Aktivierung durchzuführen, benötigen Sie eine Internetverbindung! Ohne Internetverbindung muss die Aktivierung per Email durchgeführt werden.

Beim ersten Öffnen von Timocco werden Sie aufgefordert, den Benutzernamen „admin“ und das Passwort „123456“ einzugeben.

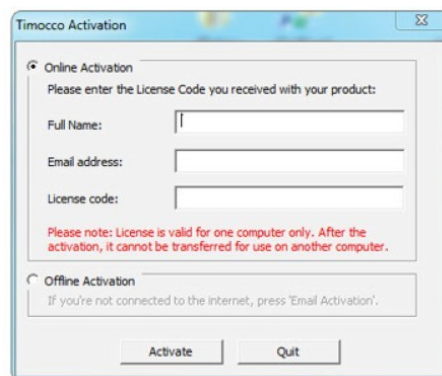


4. das Kalibrierungsfenster öffnet sich automatisch

Sie sollten sich nun selbst im Kontrollfenster sehen können




5. Ziehen Sie dem Kind die Ball-Handschuhe an

Wählen Sie bitte die Farbe, die den besten Kontrast zur Kleidung des Kindes bietet

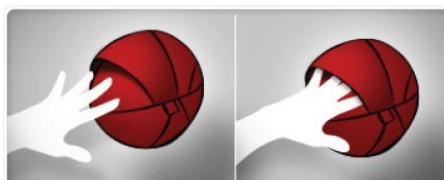

6. Kalibrieren Sie die Kamera-Software

Positionieren Sie das Kind etwa 1,5m vor der Kamera. Helfen Sie dem Kind, die Hände in Richtung der Box in der Mitte des Kontrollfensters (Timocco Video Fenster) zu halten. Sie sollten nun ein „Ready“-Zeichen auf dem Bildschirm sehen.

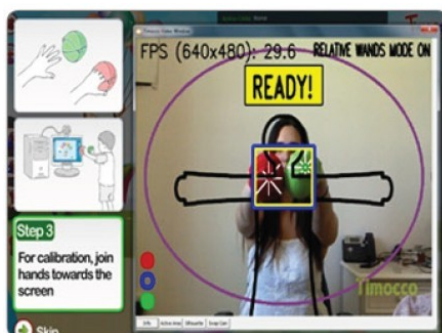

7. Wenn die Kalibrierung erfolgreich war, startet automatisch das Timocco Hauptmenü

Damit die Kameraerfassung optimal funktioniert, achten Sie darauf, dass der Raum hell genug ist und dass kein Licht direkt auf die Kamera gerichtet ist.





8. Starten der Spiele

Jedes Symbol im Hauptmenü bringt Sie zu einem anderen Spiel. Um ein Spiel zu starten, klicken Sie einfach auf das gewünschte Symbol oder bringen Sie beide Ball-Handschuhe zusammen, um einen Klick auszulösen.



9. Spiel starten

Um das Spiel zu starten, richten Sie beide Ball-Handschuhe auf das Play-Symbol oder klicken Sie mit der Maus darauf.

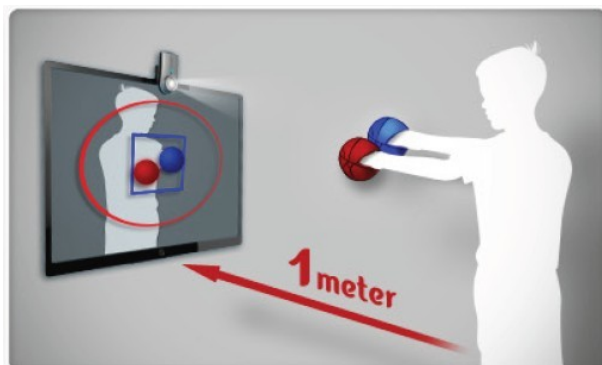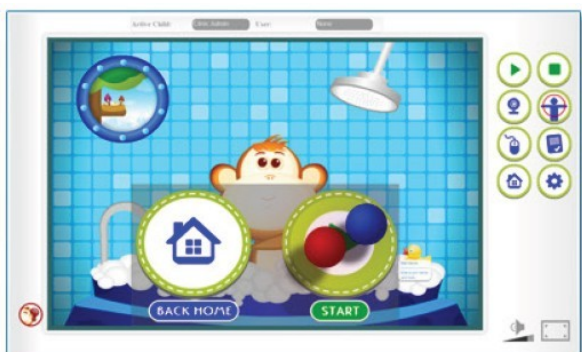

Wie Sie sehen, wird das Spiel durch die Bewegung der Hände gesteuert.

Herzlichen Glückwunsch!

Sie können nun mit dem Spielen beginnen!
Für weitere Fragen öffnen Sie das Benutzer-Handbuch,
indem Sie auf das Fragezeichen neben dem Timocco-Logo klicken.