


Vorlage Fotoalbum für Tobii Communicator verwenden

1. Fotos einfügen:

- in den Bearbeitungsmodus wechseln
- oben in der Menüleiste auf „Seite“ klicken und „Seiteneigenschaften“ auswählen
- Über „durchsuchen“ Foto aus einem Ordner auf dem PC auswählen und einfügen

Dies können Sie nun für jede Seite des Fotoalbums tun.

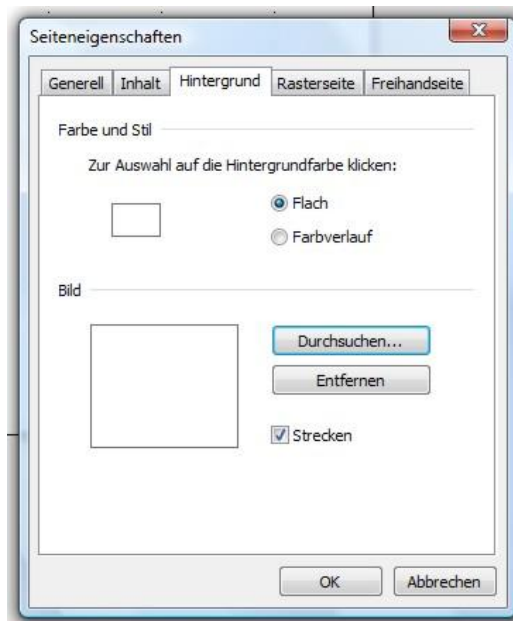

2. Unsichtbare Felder einfügen

Auf den Fotos können Sie unsichtbare Felder einfügen und mit Sprachmitteilungen versehen, so kann der Nutzer durch Drücken auf bestimmte Stellen im Foto etwas erzählen.

- Im Bearbeitungsmodus ein Feld an der gewünschten Stelle festlegen
- Anschließend oben als Hintergrundfarbe für das Feld „transparent“ und unter „Rahmendicke“ „keine Linie“ auswählen
- Nun kann das Feld mit einer Sprachmitteilung belegt werden

