

## POWERLINK

### TROCKNEN / PUSTEN

Wird der PowerLink an einen Föhn angeschlossen, kann er für die folgenden Tätigkeiten benutzt werden:

- Pustebilder machen: dünnflüssige Farbe auf ein Papier tröpfeln und dann mit dem Föhn verteilen. So entstehen lustige Bilder.
- Nach dem Abwasch das Geschirr trocknen.
- Im Werkraum die bemalten oder lackierten Sachen trocknen.
- Kerzen auspusten.
- Pustespiele machen. Allerdings muß hier der Föhn auf einer ganz kleinen Stufe angestellt werden, damit er das Pusten eines Kindes nachahmen kann.
- Nach dem Schwimmunterricht Haare föhnen.

### LAUBSÄGEN

Der PowerLink kann an eine elektrische Laubsäge angeschlossen werden. So kann ein Kind oder die Lehrperson die Laubsäge führen und das motorisch eingeschränkte Kind gibt mittels AirLink und PowerLink den Impuls vor.

### BLUMEN GIESSEN

Eine Munddusche an den PowerLink anschliessen. So können die Blumen in 2er-Gruppen gegossen werden: ein Kind hält die Munddusche, das andere Kind macht mit dem PowerLink «Wasser marsch».

### STAUBSAUGEN

Bei der Hausarbeit helfen, indem der Staubsauger an den PowerLink angeschlossen wird. So kann z. B. auch das Auto gesaugt werden.

### MUSIK

CD-Player anschließen.

Spiele machen, bei denen die Musik abgestellt wird, z. B. Stuhlspiel.

### HINWEIS

bei der Ansteuerung mit einem BIGmack oder Step-by-Step kann auch eine Sprachmitteilung mit der Ansteuerung verknüpft werden

- mit Jelly Beamer, Jelly Bean, BIGmack, Step-by-Step oder AirLink ansteuerbar
- Verschiedene Betriebsarten: Schaltermodus, eine gewisse Zeit laufen lassen (Minuten und Sekunden sind einstellbar), Direktmodus
- der eingestellte Modus wird jeweils auf beide eingesteckten Geräte angewendet. Die Geräte werden aber durch zwei unterschiedliche Taster angesteuert und können unabhängig voneinander betätigt werden.